


ESQUEMA DE TOMA, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

MUESTRAS DE SANGRE SEMANA 12 DE GESTACIÓN (V1) COHORTE INMA VALENCIA

Toma de muestra de sangre (en ayunas)

- Tubos nº 1**
 2 x 3ml tubos tapón rojo sin anticoagulante
 ➤ Almacenar a Tª ambiente en la oscuridad al menos 1 hora previa a centrifugar para permitir la coagulación.
 ➤ Centrifugar máximo de 4 horas después de la toma
- Tubos nº 2**
 2 x 3ml tubos tapón rojo sin anticoagulante
 ➤ Almacenar a Tª ambiente en la oscuridad al menos 1 hora previa a centrifugar para permitir la coagulación.
 ➤ Centrifugar máximo de 4 horas después de la toma
- Tubos nº 3**
 2 x 3 ml tubos tapón púrpura con EDTA
 ➤ Mezclar por inversión.
 ➤ Almacenar a 4°C (en frigorífico o hielo) previamente a la centrifugación.
 ➤ Centrifugar máximo de 4 horas después de la toma
- Tubos nº 4**
 2 x 3 ml tubos tapón púrpura con EDTA
 ➤ Mezclar por inversión.
 ➤ No centrifugar.
 ➤ Almacenar a Tª ambiente hasta su final almacenamiento a -70°C.

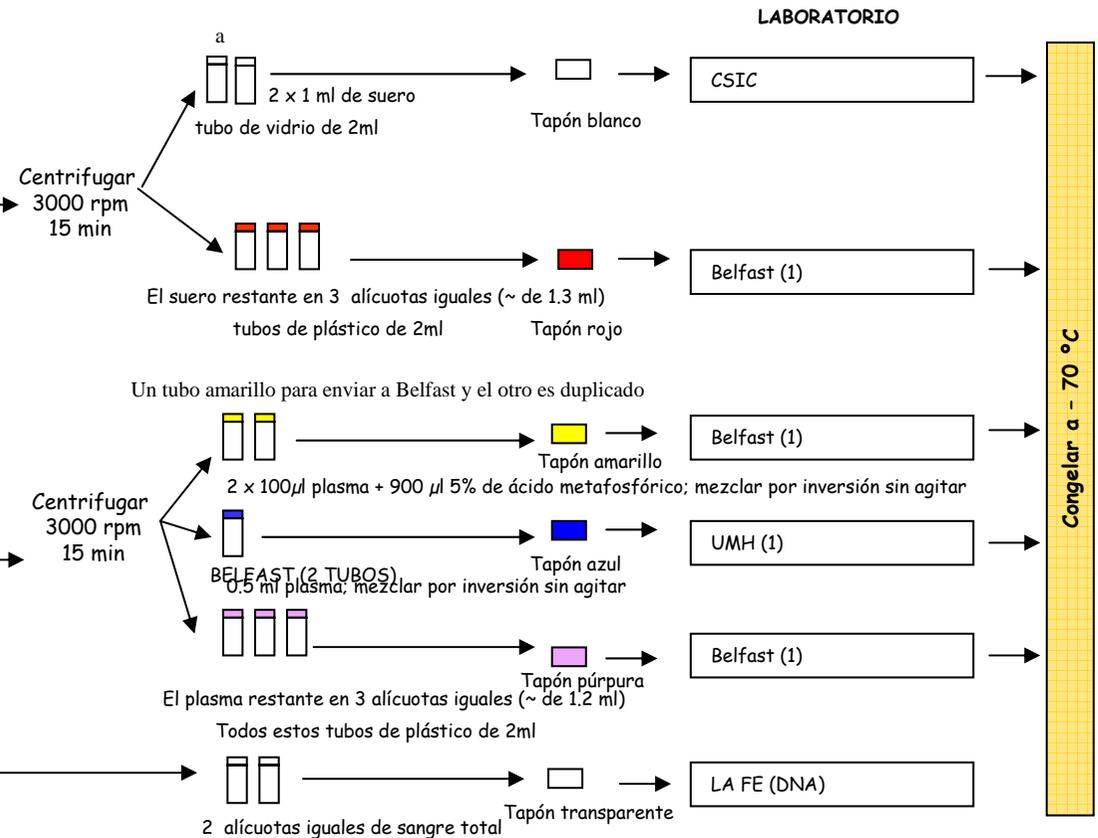

A) Posición vertical sin tocar el suero el tapón.
 B) Colocar papel de aluminio entre el tapón y el tubo

Congelar los 8 tubos juntos en una bolsa de plástico o cajita etiquetada

Los tubos vacutainer se etiquetaran con el número de la extracción.

PERSONAS DE CONTACTO

Marina Lacasaña
 Rosa Ramón
 Amparo Quiles
 Elena Romero
 Infancia y Medio Ambiente
 Hospital Maternal
 Planta 11
 Teléfono: 50915 (La Fe)
 963866205 (EVES)

